

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Кабель соединительный MCScar-U

Кабель соединительный MCScar-U с объединенными разъёмами TouchProof 1,5 мм «гнездо»/«штекер» с обеих сторон для объединения двух ЭЭГ-электродов.

Артикул

038-0-016



НАЗНАЧЕНИЕ

Для подключения ЭЭГ-электродов к усилителю.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Кабель соединительный MCScar-U.

ОПИСАНИЕ

Кабель соединительный MCScar-U предназначен для подключения одного ЭЭГ-электрода, обычно, GND (земля), одновременно к двум разъёмам усилителя ЭЭГ, например, GND и REF, если этого требует конструкция усилителя. Либо для подключения двух электродов, например ЭЭГ и ЭКГ, к одному разъёму усилителя (обычно, GND).

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Подключите штекеры кабеля MCScar-U к требуемым разъёмам усилителя, например, GND и REF или GND1 и GND2.
- Подключите провод ЭЭГ отведения с разъёмом TouchProof 1,5 мм к любому из гнезд кабеля MCScar-U.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип разъёма для подключения к шлему	TouchProof 1,5 мм (DIN 42 802-BU)
Тип разъёма для подключения к усилителю	TouchProof 1,5 мм (DIN 42 802-ST)
Длина адаптера/удлинителя	25 см
Масса изделия (масса нетто)	5 г