

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MCScap-RM1-r

Маска гигиеническая многоцветная со сменными фильтрами красная

Артикул	Наименование	Цвет
043-7-002	MCScap-RM1-r	красная



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маску тем, кто кашляет или чихает. Здоровым людям ее нужно использовать в случае, если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию или находятся в окружении потенциально зараженных людей. Маски эффективны только в комбинации с регулярным мытьем рук или обработкой их спиртосодержащим антисептиком. ВОЗ категорически не рекомендует использовать тканевые маски из хлопка или марли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ⚠ *Маска предназначена для индивидуального применения. Не допускать контакта с маской других людей.*
- ⚠ *Не следует применять маску дольше, чем 4 часа.*
- ⚠ *Если Вы почувствовали нехватку воздуха или начали терять сознание, то немедленно снимите маску.*

ОПИСАНИЕ

Маска гигиеническая многоцветная со сменными фильтрами предназначена для защиты органов дыхания. Маска изготовлена из неопрена с односторонним покрытием из нейлона. Неопрен – эластичная резина с закрытыми микропорами. Неопрен водо- и газонепроницаем. Фильтрация вдыхаемого и выдыхаемого воздуха осуществляется через два сменных фильтрующих элемента. В качестве фильтрующих элементов рекомендуется использовать нетканые ватные диски диаметром 45-55 мм.

Маска выдерживает не менее 100 процедур стирки и дезинфекции.

Фильтрующие элементы в состав изделия не входят. Их следует приобретать отдельно.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед применением необходимо вставить новые фильтрующие элементы и продезинфицировать внутреннюю и наружную поверхности маски. Новые из заводской упаковки фильтрующие элементы должны быть вставлены в карманы маски. Следует разгладить складки в фильтрующих элементах и проверить, чтобы фильтрующие элементы перекрывали внешние и внутренние отверстия для воздуха.

Если предусмотрена транспортировка или хранение маски, то ее следует поместить в чистый и продезинфицированный полиэтиленовый пакет с ZIP застежкой и закрыть до применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Надевать и снимать маску необходимо не прикасаясь к внутренней стороне маски.

Следует обжать ободок по профилю носа для минимизации воздушного потока мимо фильтрующих элементов.



ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Сразу после применения необходимо вынуть фильтрующие элементы и выбросить их в закрывающийся контейнер для отходов.

Стирать маску при температуре не более 30°C с моющими средствами для синтетических тканей. Допустима стирка в стиральной машине без использования функции отжима.

Дезинфекцию проводить спиртосодержащим средством. Следовать рекомендациям производителя этого средства. Рекомендуется замачивать маску в средстве или тщательно протирать им внутреннюю и наружную поверхности маски.

После очистки следует обработать руки спиртосодержащим средством или тщательно вымыть их с мылом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	нейлон, неопрен
Рекомендованный диаметр сменных фильтрующих элементов	45 – 55 мм
Вес	20 г

