

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Комплект съёмных ярлыков для электродов

Артикул	Номинальный диаметр провода
038-0-326	1,3 мм
038-0-327	1,0 мм



НАЗНАЧЕНИЕ

Для маркировки ЭЭГ-электродов.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Маркеры символьные - 39 шт.,
- маркеры с полем для нанесения надписи - 9 шт.

ОПИСАНИЕ

Комплект съёмных ярлыков для электродов с символами наиболее распространенных позиций ЭЭГ-электродов предназначен для крепления на провода ЭЭГ-электродов. Символы на маркерах соответствуют международной системе 10-20. Пустые ярлыки предназначены для самостоятельного нанесения символа.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Отделите маркеры от литника с помощью канцелярского ножа или другого режущего инструмента.
- Вдавите провод в зажим до фиксации.
- Для самостоятельного нанесения символа на пустой маркер используйте перманентный маркер, например, Edding 780.



Содержит мелкие детали. Во избежание проглатывания хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр провода	1,3 мм (REF 038-0-326) 1,0 мм (REF 038-0-327)
Количество ярлыков/маркеров	48 шт.
Количество маркеров с полем для самостоятельного нанесения надписи	9 шт.
Количество маркеров с символами	39 шт.



Символы	Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, A1, A2, F7, F8, T3, T4, T5, T6, Cz, Pz, FC1, FC2, CP1, CP2, CP5, CP6, F9, F10, P9, P10, Fpz, FCz, CPz, Oz, GND, Ref
Материал	ABS
Цвет	серый (REF 038-0-326) жёлтый (REF 038-0-327)
Масса одного ярлыка	< 0,05 г
Масса изделия (масса нетто)	< 4 г